

血液ガス分析装置をご利用の皆さまへ

11月15日(火) 18:00 より下記の3点が変わります。

- ① 分析結果データを KING カルテの通常の検査結果に反映させるため、従来の処置ラベル運用を取り止めます。

検体オーダーは

検体検査 ⇒ 検体検査 ⇒ 血液ガス ⇒ 血液ガス ⇒ 血液ガス(診療科)

12桁オーダー番号が印字されたバーコードラベルを発行し、測定時にご利用いただきます。

- ② ハンディタイプのバーコードリーダーはなくなります。その代りに分析装置一体型のバーコードリーダーをご利用いただきます。分析装置にバーコードの印がついた所で読ませてください。
ただしバーコードラベルをお使いでない時は、入力せずに先へ進んで測定してください。

- ③ 新運用導入により、各診療科で測定された検査結果は電子的に KING へと送信されます。

また、その検査結果は、外来採血室で採取する血液ガスや緊急検査室に提出される血液ガスと同じ時系列画面にて結果を参照できるようになります。

それに伴い Lactate の単位を院内で統一いたします。

mmol/L → mg/dL

mmol/L に分子量からの係数 9.008 倍した値が mg/dL になります。

例 Lactate 10mmol/L → 約 90.1mg/dL

正常参考値は 4.5mg/dL～18.0mg/dL です。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

これらの件に関するお問い合わせは PHS 2144 増田 6418 井川 または 6419 永田までお願いします。