



Rapid Point 500 測定方法①

① 画面の確認

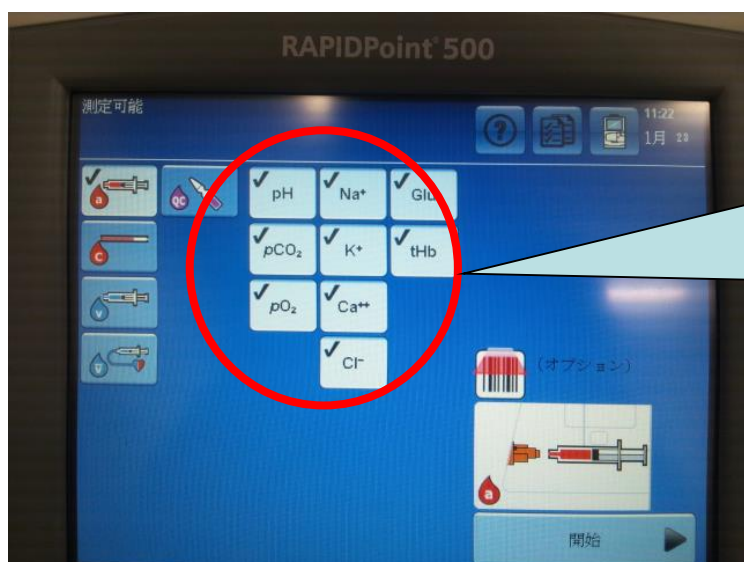


項目が ~~PQ2~~ や ~~PQ2~~ になっていないことを、ご確認ください。

② 装置に検体 (シリンジ) を挿してください

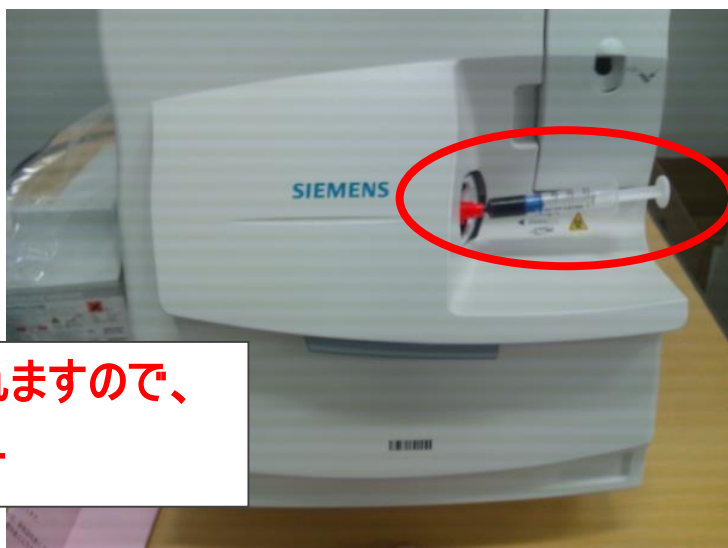


※自動吸引されますので、
圧入は不要です

③ を押して測定を開始して下さい


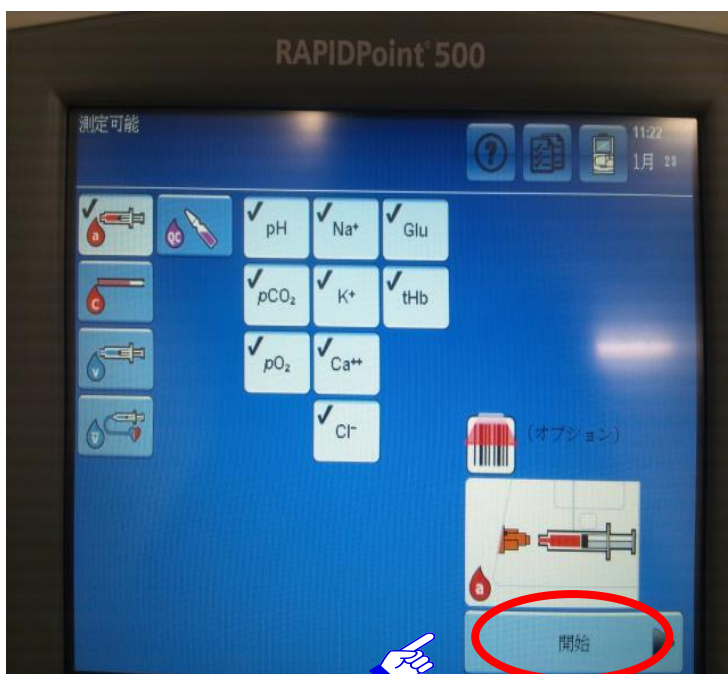


Rapid Point 500 測定方法②

- ④ 下の画面になったら、
検体吸引完了です。
シリンジを機器から外して
→ を押して下さい

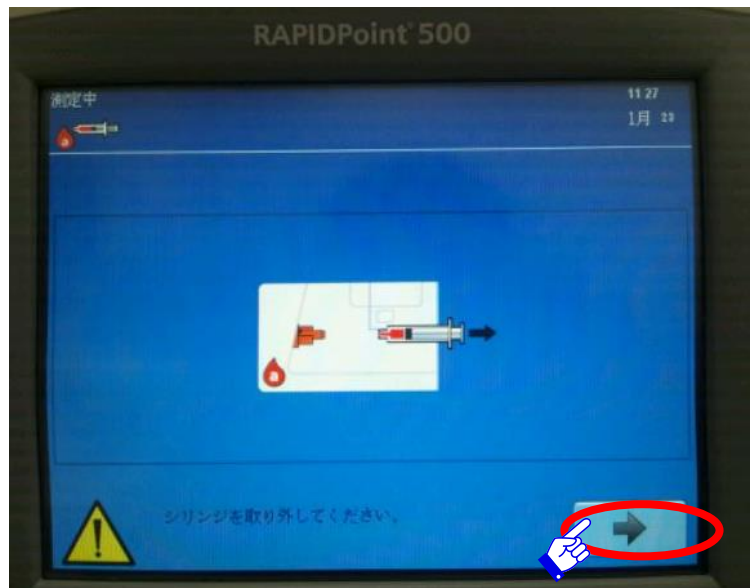

- ⑤ 患者IDを装置のバーコードリーダーで
読みとらせて、
→ を押して下さい

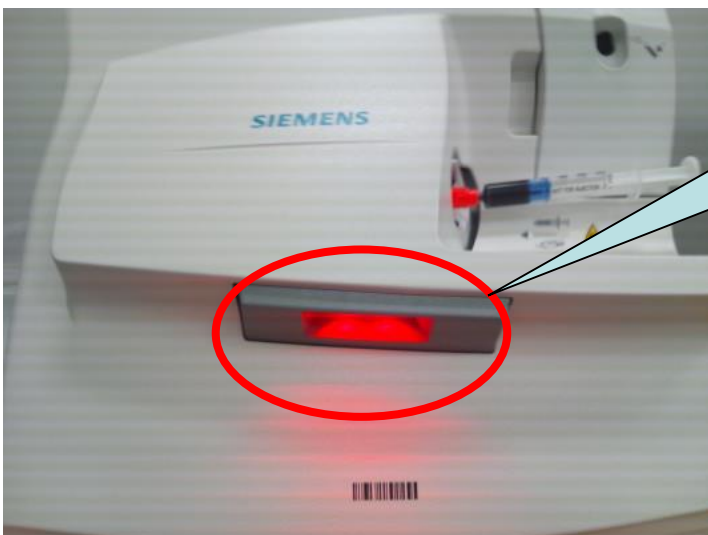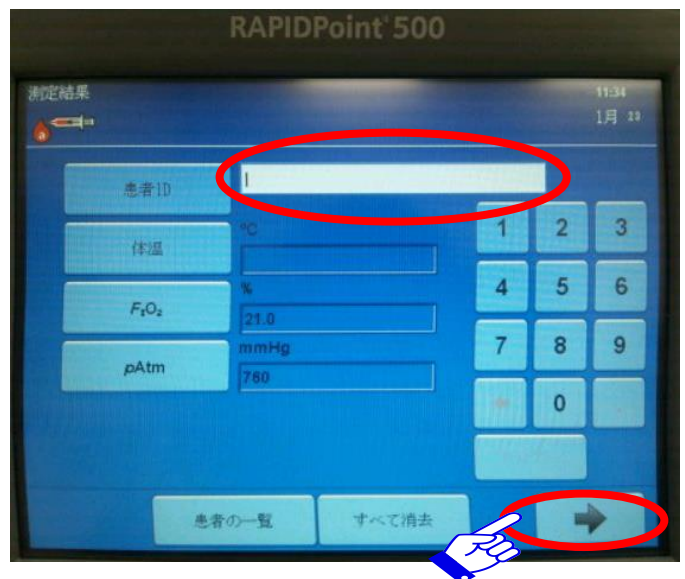

この部分がバーコードリーダーです。
検体IDを読み込ませてください。
※少し離れた方が読み込みやすいです。

Rapid Point 500 測定方法③

- ⑥ 測定結果が表示されます。
内臓プリンターからも結果
が出力されます。




注意！校正中は下記画面になります。

キャンセル可能！

STATボタンを押すと約1分で

①の画面に戻ります。

キャンセル不可！（STATボタンが無い場合）
校正終了までお待ちください。

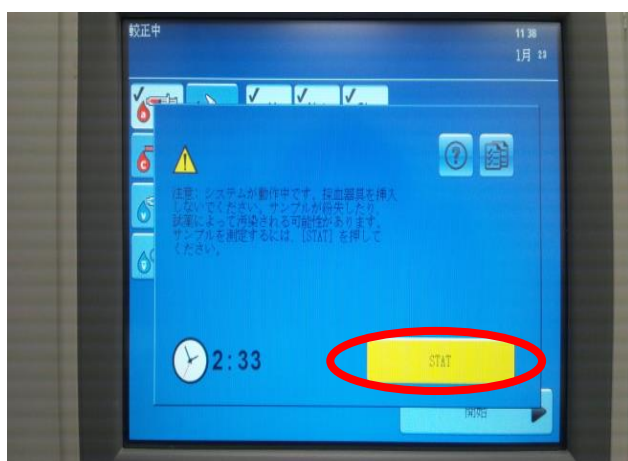

装置のトラブル時や、データについてのお問い合わせは、こちらに御願います

シーメンス血液ガス・カスタマーケアセンター