

緊急検査室脳脊髄液測定開始および単位変更について

1) 開始日時

平成23年9月5日(月)8時半

2) 測定項目

細胞数・分画(単核球・多核球の2分類)・糖・蛋白

3) 依頼方法

1. 採取する前に緊急検査室に電話連絡(3497・PHS2908)お願いします
2. 緊急検査OMR用紙の材料「リコール(蓄尿)」検査項目「髄液一般」にマークする
3. 「フ」の試験管に髄液1mlを採取してバーコードを貼る
(「フ」の試験管は「U」と同じです)
4. 緊急検査でOMR用紙をリーダーで読ませる。
5. 試験管とOMR用紙を技師に手渡す。

4) 測定機器

1. 細胞数・分画(単核球・多核球の2分類)はXT4000i使用
2. 糖・蛋白はディメンジョンEXLを使用

5) 報告方法(ルーチン検査もおなじになります)

糖・蛋白は測定値

細胞数

細胞数	報告値				
	細胞数	単核球		多核球	
		%	数	%	数
10個以下	11>	ブンカクノウ	ソクテイノウ	ブンカクノウ	ソクテイノウ
11個以上	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値

6) **変更点(ルーチン検査も変更になります)**

1. 単位

変更前: 個/3μl \longrightarrow 変更後: **個/μl**

7) 目視法との相関

