

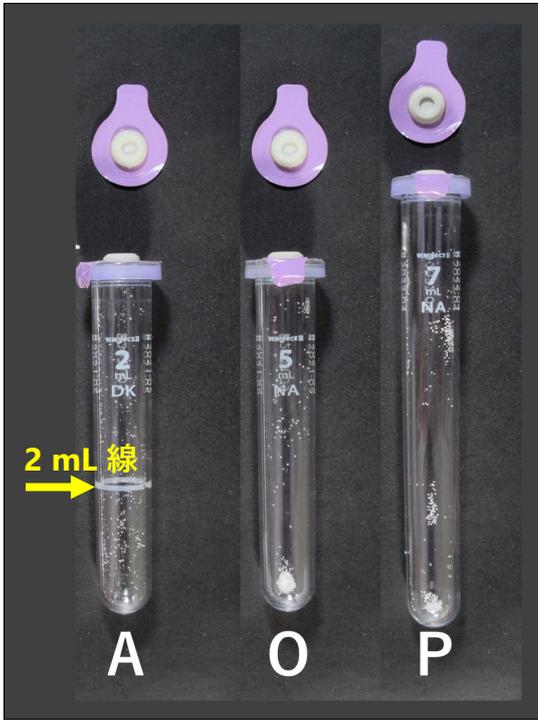
採血管（薄紫シール栓）変更のお知らせ

20-P028 (2020 Sep.)

[1/2] サポートライン
2147

このたび、安全管理上の理由によりシール栓EDTA採血管を「A」「O」「P」の3種とします。
診療科の皆様には、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2020年9月28日（月）夕方 ラベル出力分より

新	旧
<p>「A」： EDTA-2K (2 mL) DK 線入り</p> <p>「O」： EDTA-2Na (5 mL) NA 線なし</p> <p>「P」： EDTA-2Na (7 mL) NA 線なし</p> <p style="text-align: right;">3種のみ</p>	<p>「A」「O」「O.」</p> <p>「S」「P」</p> <p style="text-align: right;">5種</p>
 <p>2 mL 線</p> <p>A O P</p> <p>「O」と「O.」は内容物が同じなので <u>「O」という名称に統一</u>します</p> <p>採取した検体の保存方法は <u>ラベルに印字された情報</u>に従ってください</p>	 <p>A O P</p> <p>S O</p> <p>首に<u>シールが</u> <u>巻かれた</u> <u>採血管は</u> <u>使用終了</u> となります</p>

キョウダ イテスト

注 80 外 N60

C7-HRP

09.03 血液 @

外注1 **_****_*98001*

O 5ml **_****_***

キョウダ イテスト

注 80 外 N60

ACTH. 冷

09.03 血液 @

外注1 **_****_*98001*

O 5ml **_****_***

※旧採血管で採血されても検査は可能ですが、
ラベルの保存条件には注意をお願いします。

検査部：増田 (PHS：2144)・西山 (PHS：2141)

検査部サポートライン PHS：2147



採血管（薄紫シール栓）変更のお知らせ

20-P028 (2020 Sep.)

[2/2] サポートライン
2147

採血後の検体保存方法は、室温のものと氷冷のものがあります。

検体ラベルに印字される「冷」という文字をご確認ください。

保存	A	O	P
室温	<p>キョウダ イテスト 注 80 外 N60 急 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C. 09.03 @ 血液 血液 <input type="checkbox"/> **_****_*01001* A <input type="checkbox"/> 2ml **_****_**</p> <p>CBC・血液像 薬物血中濃度</p>	<p>キョウダ イテスト 注 80 外 N60 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C7-HRP 09.03 @ 血液 外注1 <input type="checkbox"/> **_****_*65001* O <input type="checkbox"/> 5ml **_****_**</p> <p>CMV pp65 C7-HRP CMV pp65 c10,C11</p>	<p>キョウダ イテスト 注 80 外 N60 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ケガタ. 09.03 @ 血液 輸血 <input type="checkbox"/> **_****_*47001* P <input type="checkbox"/> 7ml **_****_**</p> <p>輸血検査</p>
氷冷	<p>キョウダ イテスト 注 80 外 N60 急 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 冷 アンモニ. 09.03 @ 血液 アンモニ <input type="checkbox"/> **_****_*16001* A <input type="checkbox"/> 2ml **_****_**</p> <p>アンモニア</p>	<p>キョウダ イテスト 注 80 外 N60 急 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 冷 hBNP. 09.03 @ 血液 hBNP <input type="checkbox"/> **_****_*83001* O <input type="checkbox"/> 5ml **_****_**</p> <p>BNP など</p>	<p>キョウダ イテスト 注 80 外 N60 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 冷 TRB 09.03 @ 血液 外注2 <input type="checkbox"/> **_****_*86001* P <input type="checkbox"/> 7ml **_****_**</p> <p>遺伝子再構成 など</p>

検査部：増田 (PHS：2144)・西山 (PHS：2141)

検査部サポートライン PHS：2147

