

採血管 新規採用・変更のお知らせ

21-P017 (2021 May.)

(「C6」「VS」「E4」「P5」「A2」「A7」)

[1/12]

サポートライン
2147

このたび、安全管理上の理由により、別掲の採血管を新規採用・変更いたします。

診療科のみなさまには、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

2021年 5月 26日 (水) 夕方 ラベル発行分より

- 新規採用・変更となる採血管：以下別掲の通り
- 変更点の概要

| 容器名称 | 新 容器記号 | 容量 | 用途 |
|----------|-----------|------|---|
| 血清採取 | C6 | 6 mL | 生化学検査 (血清) (外注) 内分泌検査 (血清) (外注) 免疫血清検査 (血清) (外注) |
| | VS | 8 mL | ウイルス検査 (血清) (外注) (開栓禁) |
| ヘパリンNa | E4 | 4 mL | 生化学検査 (ヘパリン血漿) (外注) 染色体検査 (ヘパリン全血) (外注) 薬物血中濃度 (ソタロール・ベプリジル) |
| EDTA-2Na | P5 | 5 mL | hBNP (院内検査) ACTH / AVP / レニン / 遺伝子再構成 (外注) CMV pp65 抗原 / 生化学検査 (外注) |
| EDTA-2K | A2 | 2 mL | 赤沈 (院内検査) ProGRP (EDTA血漿) (外注) |
| | A7 | 7 mL | BRCA1/2遺伝子検査 (外注) |

詳細は次ページ以降を参照ください。

検査部サポートライン (PHS : 2147)

検査部：中西 (PHS 6204)・増田 (PHS 2144)・西山 (PHS 2141)



血清採取管「C6」の追加 (1/2)


21-P017 (2021 May.)

[2/12]

サポートライン
2147

血清採取容器（外注検査）として「C6」を追加します。

| C6 | |
|------------|--|
| 内容物 | 凝固促進剤＋血清分離剤 |
| キャップ | ピンク色ゴムキャップ |
| 容量 | 6 mL |
| 管壁の表記 | NIPRO[SP] 6mL |
| 採取前容器の保管方法 | 室温保管 |
| 採取後検体の取り扱い | |
| 検体容器保管場所 | 中央診療棟 2階 検査室1 |
| 主な使用目的 | 生化学検査（血清）（外注） 内分泌検査（血清）（外注） 免疫血清検査（血清）（外注） |

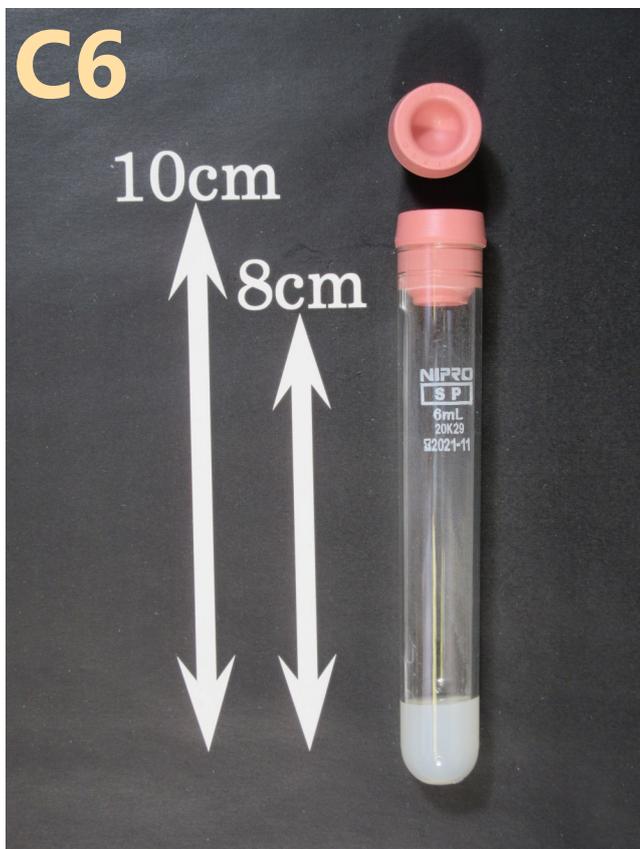

血清採取管「C6」の追加 (2/2)

[3/12]

サポートライン
2147

表1. 「C6」管 1ヶ月分の想定本数

| | C6 | | C6 |
|--------------------|-----|---------|-----|
| 北病棟 1 階 | | 積貞棟 2 階 | 23 |
| 北病棟 4 階 | 28 | 積貞棟 3 階 | 99 |
| 北病棟 5 階 | 81 | 積貞棟 4 階 | 31 |
| KCNT | 1 | 積貞棟 5 階 | 43 |
| ESICU | 22 | 積貞棟 6 階 | 18 |
| 中病棟 2 階 | 5 | 積貞棟 7 階 | 66 |
| MFICU | 2 | 積貞棟 8 階 | |
| NICU | 17 | 南病棟 1 階 | 9 |
| GCU | 10 | 南病棟 2 階 | 45 |
| C/HCU | 13 | 南病棟 3 階 | 72 |
| 集中治療部 | 29 | 南病棟 4 階 | 67 |
| 中病棟 5 階 | 45 | 南病棟 5 階 | 27 |
| 中病棟 6 階 | 50 | 南病棟 6 階 | 76 |
| 中病棟 7 階 | 113 | 南病棟 7 階 | 138 |
| 中病棟 8 階 | 8 | 南病棟 8 階 | 20 |
| 1ヶ月分の想定本数 | | 西病棟 | 21 |
| ピンクラベル+白ラベル | | | |

※ 白ラベルは全本数のうち1~2割程度なので、実際に病棟で準備いただくのは

表に示した本数の1~2割程度と予測されます。



血清採取管（ウイルス検査用）

21-P017（2021 May.）


「VS」 への変更（1/2）

[4/12]


サポートライン
2147

ウイルス検査用血清採取容器（外注検査）として「ホ」を「VS」に変更します。

| VS | |
|------------|------------------|
| 内容物 | 凝固促進剤＋血清分離剤 |
| キャップ | ピンク色ゴムキャップ |
| 容量 | 8 mL |
| 管壁の表記 | [80]ウイルス遺伝子検査用容器 |
| 採取前容器の保管方法 | 室温保管 |
| 採取後検体の取り扱い | 開栓禁止 |
| 検体容器保管場所 | 中央診療棟 2階 検査室1 |
| 主な使用目的 | ウイルス検査（血清）（外注） |

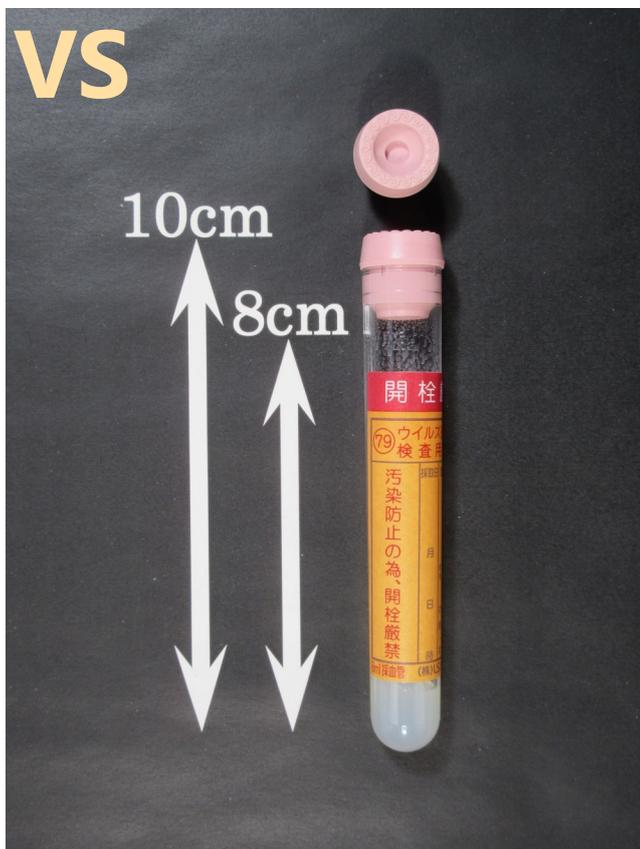

旧容器で出検されても、検査は可能です。

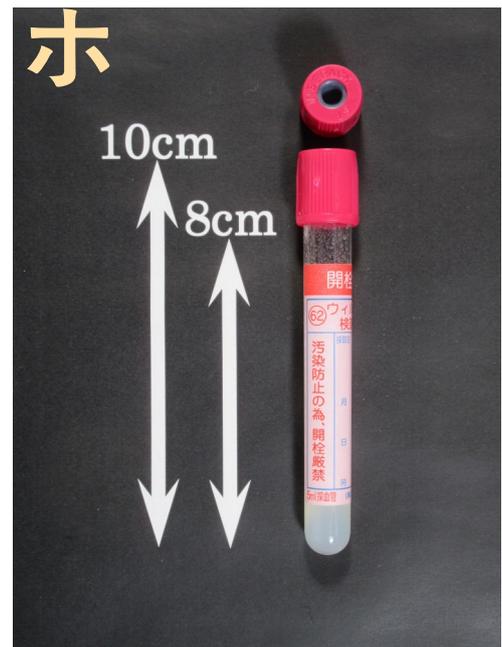

血清採取管（ウイルス検査用）

21-P017（2021 May.）

「VS」への変更（2/2）

[5/12]

サポートライン
2147

表2. 「VS」管 1ヶ月分の想定本数

| | VS | | VS |
|--------------------|----|---------|----|
| 北病棟 1 階 | | 積貞棟 2 階 | |
| 北病棟 4 階 | | 積貞棟 3 階 | 18 |
| 北病棟 5 階 | | 積貞棟 4 階 | |
| KCNT | | 積貞棟 5 階 | |
| ESICU | | 積貞棟 6 階 | |
| 中病棟 2 階 | | 積貞棟 7 階 | 1 |
| MFICU | | 積貞棟 8 階 | |
| NICU | | 南病棟 1 階 | |
| GCU | | 南病棟 2 階 | |
| C/HCU | | 南病棟 3 階 | |
| 集中治療部 | | 南病棟 4 階 | 1 |
| 中病棟 5 階 | | 南病棟 5 階 | |
| 中病棟 6 階 | | 南病棟 6 階 | |
| 中病棟 7 階 | | 南病棟 7 階 | 1 |
| 中病棟 8 階 | | 南病棟 8 階 | |
| 1ヶ月分の想定本数 | | 西病棟 | |
| ピンクラベル+白ラベル | | | |

※ 白ラベルは全本数のうち1~2割程度なので、実際に病棟で準備いただくのは

表に示した本数の1~2割程度と予測されます。



ヘパリンNa管「E4」の追加 (1/2)

21-P017 (2021 May.)


[6/12]

サポートライン
2147

血漿・全血採取容器（外注検査）として「E4」を追加します。

E4

| | |
|------------|---|
| 内容物 | ヘパリンナトリウム |
| キャップ | 緑色ゴムキャップ |
| 容量 | 4 mL |
| 管壁の表記 | NIPRO[HE] 4mL |
| 採取前容器の保管方法 | 室温保管 |
| 採取後検体の取り扱い | 要転倒混和 |
| 検体容器保管場所 | 中央診療棟 2階 検査室1 |
| 主な使用目的 | 生化学検査（ヘパリン血漿）（外注） 染色体検査（ヘパリン全血）（外注） 薬物血中濃度（ソタロール・ベプリジル） |

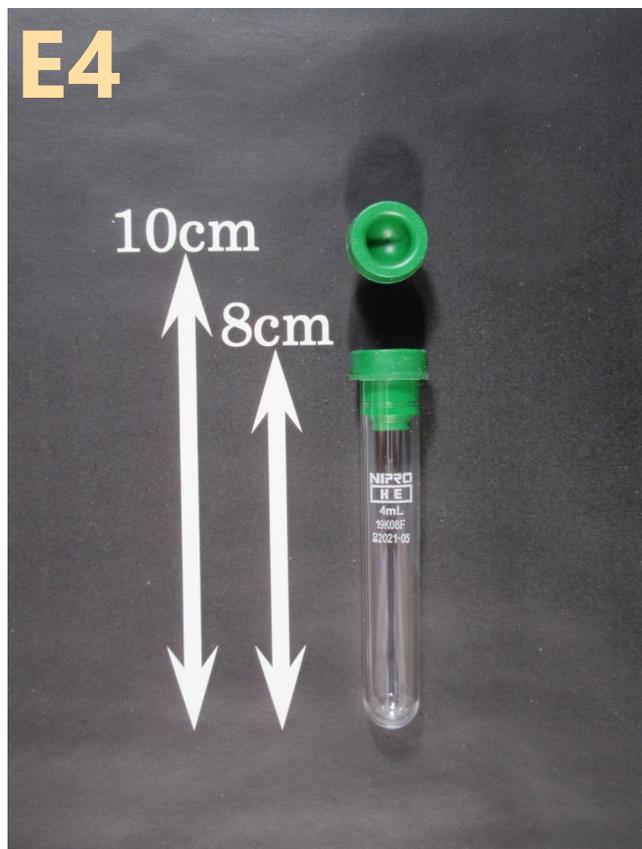

ヘパリンNa管「E4」の追加 (2/2)

[7/12]

サポートライン
2147

表3. 「E4」管 1ヶ月分の想定本数

| | E4 | | E4 |
|--------------------|----|---------|----|
| 北病棟 1 階 | | 積貞棟 2 階 | |
| 北病棟4階 | 4 | 積貞棟 3 階 | |
| 北病棟5階 | | 積貞棟 4 階 | |
| KCNT | | 積貞棟 5 階 | |
| ESICU | | 積貞棟 6 階 | |
| 中病棟 2 階 | | 積貞棟 7 階 | 1 |
| MFICU | | 積貞棟 8 階 | |
| NICU | | 南病棟 1 階 | |
| GCU | | 南病棟 2 階 | |
| C/HCU | 1 | 南病棟 3 階 | |
| 集中治療部 | 3 | 南病棟 4 階 | |
| 中病棟 5 階 | | 南病棟 5 階 | |
| 中病棟 6 階 | 17 | 南病棟 6 階 | |
| 中病棟 7 階 | | 南病棟 7 階 | |
| 中病棟 8 階 | | 南病棟 8 階 | |
| 1ヶ月分の想定本数 | | 西病棟 | |
| ピンクラベル+白ラベル | | | |

※ 白ラベルは全本数のうち1~2割程度なので、実際に病棟で準備いただくのは

表に示した本数の1~2割程度と予測されます。



EDTA-2Na管「P5」への変更 (1/2)


21-P017 (2021 May.)

[8/12]


サポートライン
2147

BNP検査用容器（院内検査）および全血・血漿採取容器（外注検査）として「**O**」を「**P5**」に変更します。

| P5 | |
|------------|---|
| 内容物 | EDTA-2Na |
| キャップ | 薄紫色ゴムキャップ |
| 容量 | 5 mL |
| 管壁の表記 | NIPRO[EN] 5mL |
| 採取前容器の保管方法 | 室温保管 |
| 採取後検体の取り扱い | 要転倒混和 |
| 検体容器保管場所 | 中央診療棟 2階 検査室1 |
| 主な使用目的 | hBNP（院内検査） ACTH / AVP / レニン / 遺伝子再構成（外注） CMV pp65 抗原 / 一部の生化学検査（外注） |

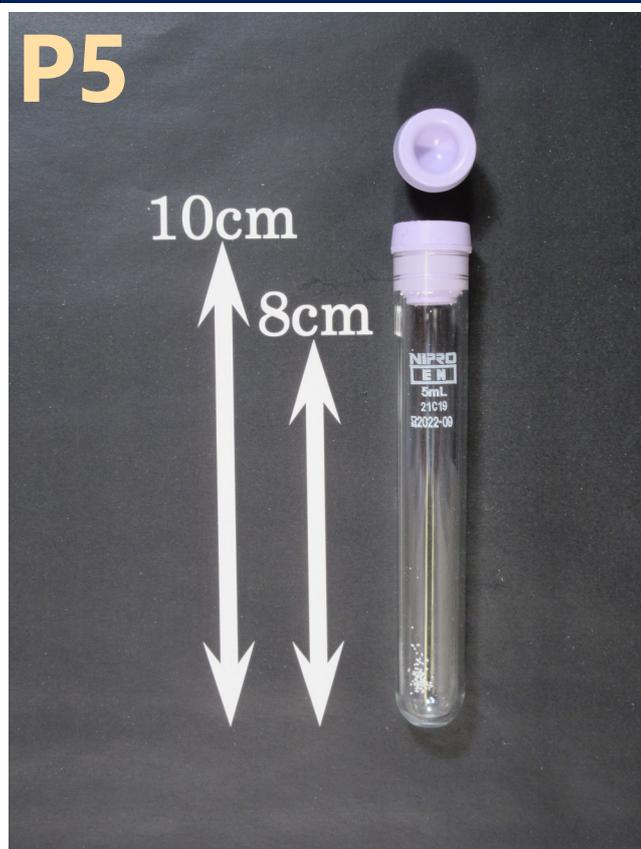

旧容器で出検されても、検査は可能です。

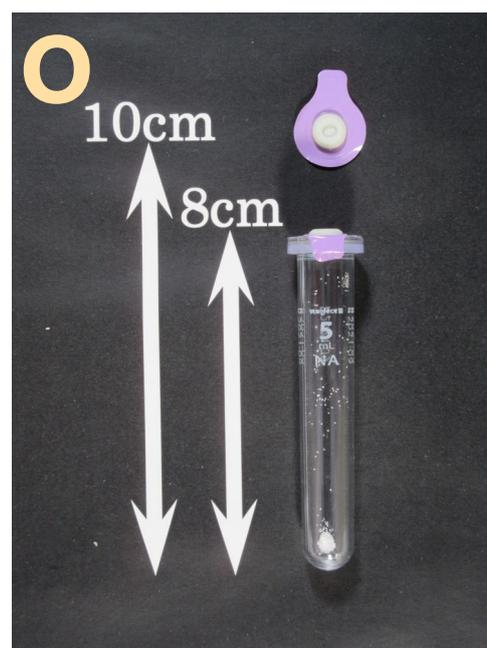

EDTA-2Na管「P5」への変更 (2/2)

21-P017 (2021 May.)

[9/12]

サポートライン
2147

表4. 「P5」管 1ヶ月分の想定本数

| | P5 | | P5 |
|--------------------|-----|---------|-----|
| 北病棟 1 階 | | 積貞棟 2 階 | 24 |
| 北病棟 4 階 | 42 | 積貞棟 3 階 | 114 |
| 北病棟 5 階 | 82 | 積貞棟 4 階 | 92 |
| KCNT | 1 | 積貞棟 5 階 | 65 |
| ESICU | 23 | 積貞棟 6 階 | 8 |
| 中病棟 2 階 | | 積貞棟 7 階 | 33 |
| MFICU | 9 | 積貞棟 8 階 | |
| NICU | 4 | 南病棟 1 階 | 5 |
| GCU | | 南病棟 2 階 | 69 |
| C/HCU | 49 | 南病棟 3 階 | 66 |
| 集中治療部 | 39 | 南病棟 4 階 | 44 |
| 中病棟 5 階 | 129 | 南病棟 5 階 | 21 |
| 中病棟 6 階 | 28 | 南病棟 6 階 | 106 |
| 中病棟 7 階 | 400 | 南病棟 7 階 | 85 |
| 中病棟 8 階 | 10 | 南病棟 8 階 | 11 |
| 1ヶ月分の想定本数 | | 西病棟 | 30 |
| ピンクラベル+白ラベル | | | |

※ 白ラベルは全本数のうち1~2割程度なので、実際に病棟で準備いただくのは

表に示した本数の1~2割程度と予測されます。



EDTA-2K管「A2」の追加 (1/2)


21-P017 (2021 May.)

[10/12]

サポートライン
2147

赤沈（院内検査）および一部の腫瘍マーカー検査（外注検査）として「A2」を追加します。

| A2 | |
|------------|---------------|
| 内容物 | EDTA-2K |
| キャップ | 薄紫色ゴムキャップ |
| 容量 | 2 mL |
| 管壁の表記 | NIPRO[EK] 2mL |
| 採取前容器の保管方法 | 室温保管 |
| 採取後検体の取り扱い | 要転倒混和 |
| 検体容器保管場所 | 中央診療棟 2階 検査室1 |
| 主な使用目的 | 赤沈（院内検査） |

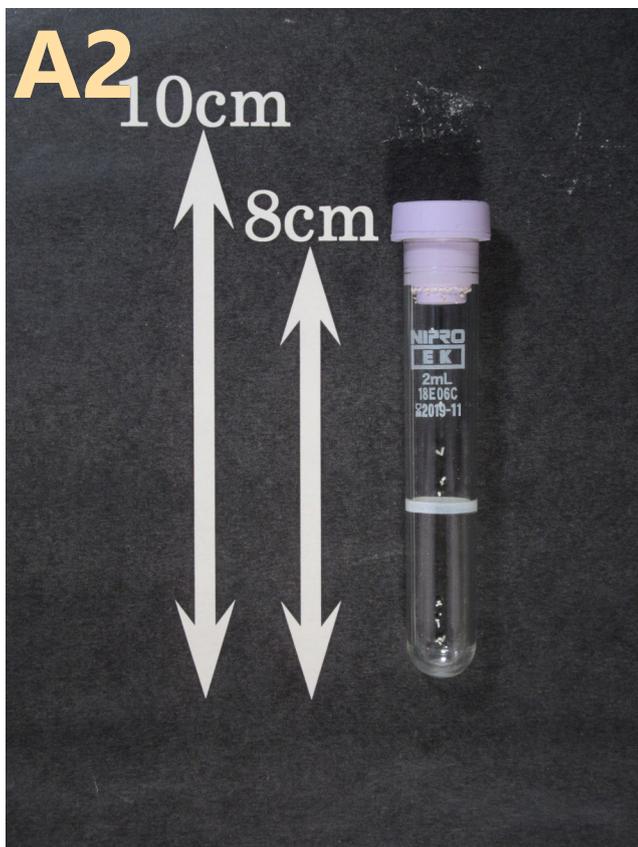

EDTA-2K管「A2」の追加 (2/2)

21-P017 (2021 May.)

[11/12]

サポートライン
2147

表5. 「A2」管 1ヶ月分の想定本数

| | A2 | | A2 |
|--------------------|----|---------|----|
| 北病棟 1 階 | | 積貞棟 2 階 | 3 |
| 北病棟 4 階 | 1 | 積貞棟 3 階 | 5 |
| 北病棟 5 階 | 13 | 積貞棟 4 階 | 2 |
| KCNT | | 積貞棟 5 階 | 10 |
| ESICU | 3 | 積貞棟 6 階 | 1 |
| 中病棟 2 階 | | 積貞棟 7 階 | 36 |
| MFICU | | 積貞棟 8 階 | |
| NICU | | 南病棟 1 階 | 24 |
| GCU | | 南病棟 2 階 | 20 |
| C/HCU | | 南病棟 3 階 | 23 |
| 集中治療部 | 15 | 南病棟 4 階 | 6 |
| 中病棟 5 階 | 1 | 南病棟 5 階 | 1 |
| 中病棟 6 階 | | 南病棟 6 階 | 9 |
| 中病棟 7 階 | 2 | 南病棟 7 階 | 53 |
| 中病棟 8 階 | | 南病棟 8 階 | 3 |
| 1ヶ月分の想定本数 | | 西病棟 | 1 |
| ピンクラベル+白ラベル | | | |

※ 白ラベルは全本数のうち1~2割程度なので、実際に病棟で準備いただくのは


表に示した本数の1~2割程度と予測されます。



EDTA-2K管「A7」の追加

BRCA1/2遺伝子検査用容器（外注検査）として「A7」を追加します。

| A7 | |
|------------|------------------|
| 内容物 | EDTA-2K |
| キャップ | 濃紫色オーバーキャップ |
| 容量 | 7 mL |
| 管壁の表記 | BD EDTA (K2) |
| 採取前容器の保管方法 | 室温保管 |
| 採取後検体の取り扱い | 要転倒混和 |
| 検体容器保管場所 | 中央診療棟 2階 検査室3 |
| 主な使用目的 | BRCA1/2遺伝子検査（外注） |

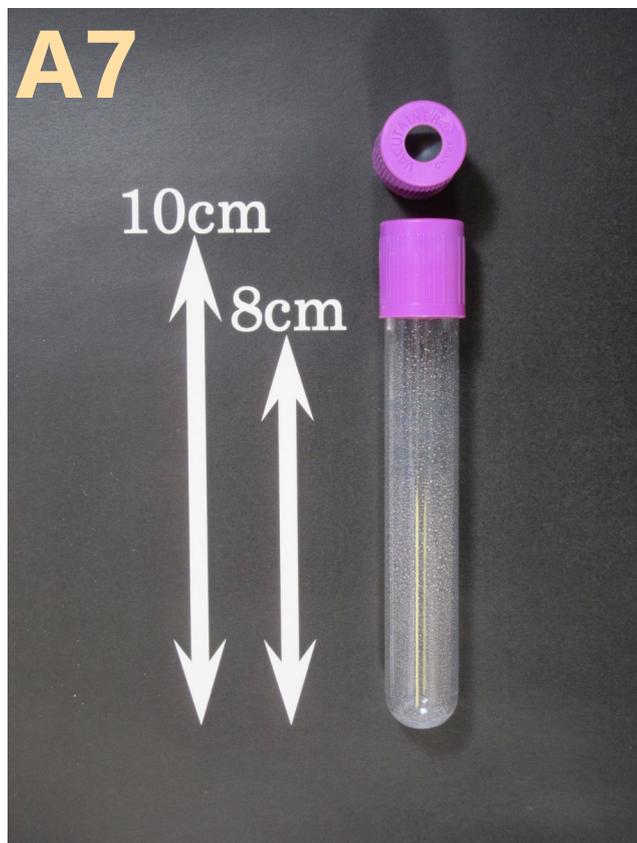

BRCA1/2遺伝子検査は、外来のみの出検です。

