

①PPE着用




- 1.手指衛生
- 2.エプロン or ガウン
- 3.シールド付きマスク
- 4.手袋

②チューブ・スワブ取り出し



③鼻咽頭に挿入

- ・鼻腔孔から耳孔を結ぶ線に平行に、鼻腔底に沿いゆっくり挿入
- ・抵抗を感じたところで止める（成人10 cm,小児5 cm程度）
- ・10秒そのままの位置で保ち鼻汁を浸透させ、ゆっくり回転させながら引き抜く


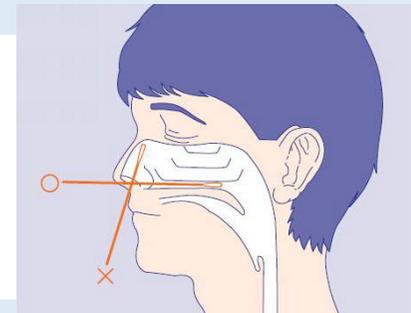


④スワブをチューブへ

ブレークポイント
がある



①フタをとる

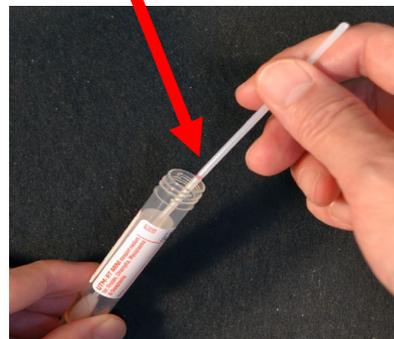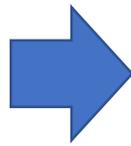

②赤ラインをチューブの最上部に合わせ折る



③フタを閉める



④ラベルを貼る

スワブは
チューブに
入ったまま