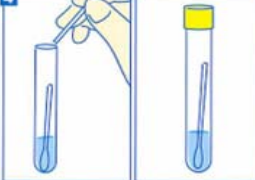
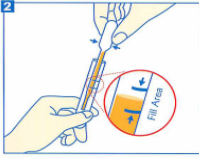
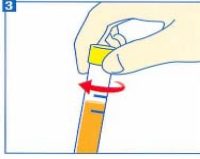
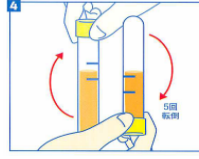
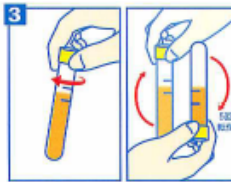


| 容器形態                                                                                                                                     | 検査項目             | 保存 | 検体取り扱い方法                                                                           |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>(ラ)</b><br><br>内容<br>グアニジン塩酸塩<br>貯蔵方法 室温<br>有効期間 1 年 | クラミジアトラコマティス DNA | 冷蔵 |   | スワブ検体採取セット付属の 1 本目のスワブで子宮頸管とその周辺部の過剰な粘液を充分拭い取ります。                           |
|                                                                                                                                          |                  |    |   | 附属されている 2 本目のスワブを子宮頸管内に挿入します。同じ方向にそっと 5 回スワブを回します。                          |
|                                                                                                                                          | 淋菌 DNA           |    |   | 専用容器のキャップを開け、採取したスワブの先端の綿球が容器内の溶液に漬からないように注意しながら入れ、柄につけられた黒い線を専用容器の縁に合わせます。 |
|                                                                                                                                          |                  |    |  | 専用容器の縁を利用して、スワブの柄につけられた線で折り入れキャップをしっかり閉め、冷蔵保存にて提出してください。                    |

| 容器形態                                                                                                                                                          | 検査項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保存 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>(リ)</b><br>滅菌スポイト<br>滅菌カップ<br><br>内容<br>グアニジン塩酸塩<br>貯蔵方法 室温<br>有効期間 1 年 | クラミジアトラコマティス DNA<br>淋菌 DNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 冷蔵 |
|                                                                                                                                                               | <p>●尿検体からの採取<br/>最後の排尿から少なくとも 1 時間以上経過後の初尿を採取してください。</p> <p>①滅菌済みカップに初尿を採取し、滅菌済みスポイトを用いて初尿を専用容器に移します。</p> <p>②専用容器に記載されている 2 つのラインの間に収まるように初尿を加えてください。</p> <p>③専用容器のキャップをしっかりと閉めてください。</p> <p>④専用容器を 5 回転倒混和して冷蔵にて提出してください。</p> <div>     </div> <p>●うがい液検体からの採取<br/>検体採取前の食事・うがい・歯磨き・ガムを噛むことなどは避けてください。</p> <p>①滅菌生理食塩水をカップに 15~20mL 入れ口に含み、顔を上に向けて 10~20 秒間、勢いよくうがいを行ないます。</p> <p>②うがい液全量をコップに回収し、スポイトで専用容器に記載されている 2 つのラインの間に収まるように添加します。</p> <p>③専用容器のキャップをしっかりと閉め、5 回転倒混和して冷蔵保存にて提出してください。</p> <div>    </div> |    |