


微生物検体保存方法

S0008 (Ver.4)

微生物検体の病棟での保存方法は、検体ラベルの印字に従ってください

多くは冷蔵ですが、室温保存する検体はラベルに「室温保管」と印字されます

問合せ(平日・休日とも) 8:30~17:15 内線3500 / 夜間 PHS 2908

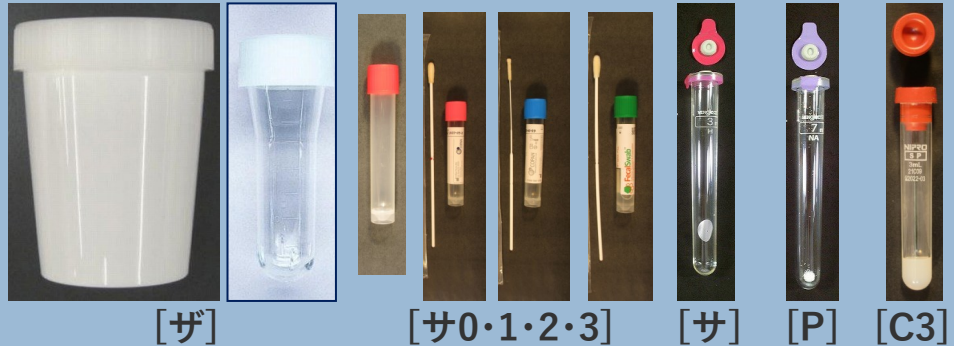

[ザ]

[サ0・1・2・3]

[サ]

[P]

[C3]




[ジ][ゲ] 血液培養

室温保管

キョウダ イテスト	キョウダ イテスト	キョウダ イテスト	キョウダ イテスト	キョウダ イテスト	キョウダ イテスト
注 80 外 N60	注 80 外 N60	注 80 外 N60	注 80 外 N60	注 80 外 N60	注 80 外 N60
G	G	G	BEEN	P	CR
09.03 尿	09.03 喀痰	09.03 鼻腔sw	09.03 血液 氷冷採血 氷冷搬送	09.03 静脈血	09.03 血液
微生物	微生物	微生物	微生物	微生物	微生物
ザ 0ml	ザ 0ml	ザ 0ml	サ 3ml	ゲ 0ml	C3 3ml

冷蔵保管

各種培養・迅速検査 等

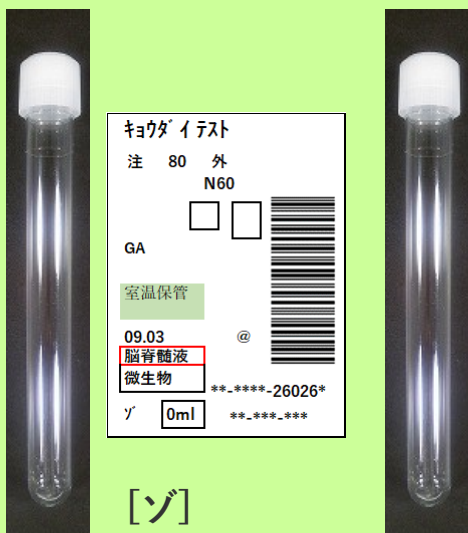

[ゾ]



こちらを優先

無菌的に分けるのが
不能な場合は
2本に分けなくてよい

※緊検には無菌的に
分けるための手段は
ありません
分けずに
保管してください



[ゾ][ザ](2枚貼り)

髄液培養・クリプトコッカス



[V3]

[Vキ]



[ザ]

クリプトコッカス