

[0207000/2A-110-001]

Ver.13

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A110 網赤血球数(網状赤血球数)

網赤血球数(網状赤血球数)

reticulocytes

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

寒冷凝集素価高値の患者検体では、凝集した赤血球が網赤血球領域に分布して網赤血球が偽高値となる可能性があります。マラリア感染により網赤血球が偽高値となる可能性があります。色素に染まる成分（Heinz / Howell-Jolly / Pappenheimer）を有する患者検体では、網赤血球が偽高値となる可能性があります。

オーダーボタン名(検体)

0207000

001

末血・網

0207000

002

末血・像・網

検査予約

至急オーダー

可

検査オーダーに関する注意事項

患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

<p>キョウダ イテスト</p> <p>注 80 外</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 急</p> <p>C.R.</p> <p>血液</p> <p>中検 <input type="text"/> * _****-01001</p> <p>A <input type="text"/> 2ml **_***_***</p>	<p>キョウダ イテスト</p> <p>注 80 外</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 急</p> <p>C.H.R.</p> <p>血液</p> <p>中検 <input type="text"/> * _****-01001</p> <p>A <input type="text"/> 2ml **_***_***</p>
--	--

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

[0207000/2A-110-001]

Ver.13

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A110 網赤血球数(網状赤血球数)

網赤血球数(網状赤血球数)


reticulocytes

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

採取容器・検査材料

01	A	EDTA-2K(薄紫)	
採取材料	血液	採取量	2 mL
測定材料	全血	測定必要量	

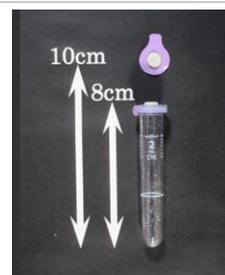

採取容器について

検体採取について

採取後検体の取扱い

室温保存

検体搬送について

採取後ただちに搬送

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	翌日保存不可	保存条件1	保存不可					

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

再検査・追加検査の対応可能日数

検体採取から6時間

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

[0207000/2A-110-001]

Ver.13

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A110 網赤血球数(網状赤血球数)

網赤血球数(網状赤血球数)

reticulocytes

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

検査機器 平日時間内：XR-9000（シスメックス） / 休日・時間外：XN-1000（シスメックス）

検査所要日数 当日報告

検査部門・委託先

検査部門(平日時間内) 中央診療棟2階 中央検査室

検査部門(時間外・休日) 中央診療棟2階 時間外検査室

検査結果報告について

基準値設定材料・検査方法

基準値設定材料 血液

検査方法 フローサイトメトリー法

生物学的基準範囲

		男性	女性	単位
00	比率	6.7 - 18.1	7.0 - 20.0	‰
00	絶対数	0.02 - 0.10	0.02 - 0.10	X10 ¹² /L
00	RET-He	***	***	pg
00	FRC%	***	***	%

基準値情報

緊急異常値

電話連絡対応

臨床的意義

異常値を示す病態・疾患

参考文献

JLAC10

分析物 2A110 網赤血球数(網状赤血球数)

識別 0000

[0207000/2A-110-001]

Ver.13

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A110 網赤血球数(網状赤血球数)

網赤血球数(網状赤血球数)

reticulocytes

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

材料	019	全血(添加物入り)
測定法	000	

変更履歴

Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2008/04/01	2008/04/01～	制定
2	2012/02/01	2012/01/04～	検査機器変更
3	2016/04/25	2016/04/01～	平成28年度診療報酬改定
4	2018/04/06	2018/04/01～	平成30年度診療報酬改定
5	2020/04/02	2020/04/01～	令和2年度診療報酬改定
6	2022/03/09	2021/12/09～	採取名称部分に検体搬送先を印字
7	2022/04/06	2021/06/25～	検査室名称を変更
8	2022/04/07	2022/01/04～	検査機器変更・報告成分追加
9	2022/07/08	2022/01/01～	緊急異常値変更
10	2022/08/01	2022/04/01～	令和4年度診療報酬改定
11	2022/10/21	2022/03/28～	24時間測定可能項目として改訂, 項目コード統合 ([0207000] ← [0207000・em0207000])
12	2022/12/01	2022/12/01～	受入不可基準などについて全面改訂
13	2024/06/04	2024/06/01～	令和6年度診療報酬改定