

[5443/1C-015-001]

Ver.12

1.一般検査 >> 1C.髄液検査>>1C015 糖定量 [髄液]

糖定量

[髄液]

glucose, quantitative

連絡先 平日時間内：PHS 6570

時間外・休日：3479・PHS 2908

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

オーダーボタン名(検体)

5443

001

糖定量 [髄液]

検査予約

至急オーダー


可

検査オーダーに関する注意事項

患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

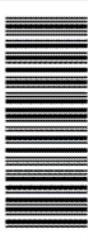キョウダ イテスト	
注	80 外
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ラボ 1.	
リコール	*_*_*_*_*-22001
尿検査室	**_*_*_*_*_*
7	2ml

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

採取容器・検査材料

[5443/1C-015-001]

Ver.12

1.一般検査 >> 1C.髄液検査>>1C015 糖定量 [髄液]

糖定量


[髄液]

glucose, quantitative

連絡先 平日時間内：PHS 6570

時間外・休日：3479・PHS 2908

01	フ	プレイン		
	採取材料	髄液	採取量	3 mL
	測定材料		測定必要量	

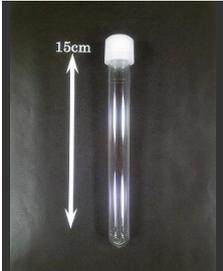

採取容器について

検体採取について

採取後検体の取扱い

室温保存

検体搬送について

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	遠心後の髄液上清	保存条件1	冷蔵					

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
			不可	不可
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

再検査・追加検査の対応可能日数

検体採取当日のみ

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

髄液採取後に長く放置すると、特に細菌性髄膜炎では細菌の糖分解がおこるので、なるべく早く測定する必要があります。

[5443/1C-015-001]

Ver.12

1.一般検査 >> 1C.髄液検査>>1C015 糖定量 [髄液]

糖定量

[髄液]

glucose, quantitative

連絡先 平日時間内：PHS 6570

時間外・休日：3479・PHS 2908

測定法	272	紫外吸光光度法 (UV法)
-----	-----	---------------

変更履歴

Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2008/04/01	2008/04/01～	制定
2	2016/04/25	2016/04/01～	平成28年度診療報酬改定
3	2018/04/06	2018/04/01～	平成30年度診療報酬改定
4	2019/02/07	2018/12/14～	緊急検査室の機器更新 (LABOSPECT 008 α) に合わせて内容を見直し
5	2019/03/06	2019/03/06～	検体保存条件を追記
6	2020/04/02	2020/04/01～	令和2年度診療報酬改定
7	2022/03/09	2021/12/09～	採取名称部分に検体搬送先を印字
8	2022/04/06	2021/06/28～	検査場所を変更
9	2022/08/01	2022/04/01～	令和4年度診療報酬改定
10	2022/10/21	2022/03/28～	24時間測定可能項目として改訂, 項目コード統合 ([5443] ← [5443・9192])
11	2022/12/01	2022/12/01～	受入不可基準などについて全面改訂
12	2024/06/04	2024/06/01～	令和6年度診療報酬改定